



<http://www.zwai.net>

Dräger Evita 1 ® BiPAP® - Einstellungen über das Menu

1:2		
Frequenz	Inspiration (sec.)	Expiration (sec.)
7	2,86	5,71
8	2,50	5,00
9	2,22	4,44
10	2,00	4,00
11	1,82	3,64
12	1,67	3,33
13	1,54	3,08
14	1,43	2,86
15	1,33	2,67
16	1,25	2,50
17	1,18	2,35
18	1,11	2,22
19	1,05	2,11
20	1,00	2,00
21	0,95	1,90
22	0,91	1,82
23	0,87	1,74
24	0,83	1,67
25	0,80	1,60

1:1,5		
Frequenz	Inspiration (sec.)	Expiration (sec.)
7	3,43	5,14
8	3,00	4,50
9	2,67	4,00
10	2,40	3,60
11	2,18	3,27
12	2,00	3,00
13	1,85	2,77
14	1,71	2,57
15	1,60	2,40
16	1,50	2,25
17	1,41	2,12
18	1,33	2,00
19	1,26	1,89
20	1,20	1,80
21	1,14	1,71
22	1,09	1,64
23	1,04	1,57
24	1,00	1,50
25	0,96	1,44

1:1		
Frequenz	Inspiration (sec.)	Expiration (sec.)
7	4,29	4,29
8	3,75	3,75
9	3,33	3,33
10	3,00	3,00
11	2,73	2,73
12	2,50	2,50
13	2,31	2,31
14	2,14	2,14
15	2,00	2,00
16	1,88	1,88
17	1,76	1,76
18	1,67	1,67
19	1,58	1,58
20	1,50	1,50
21	1,43	1,43
22	1,36	1,36
23	1,30	1,30
24	1,25	1,25
25	1,20	1,20

1,5:1		
Frequenz	Inspiration (sec.)	Expiration (sec.)
7	5,14	3,43
8	4,50	3,00
9	4,00	2,67
10	3,60	2,40
11	3,27	2,18
12	3,00	2,00
13	2,77	1,85
14	2,57	1,71
15	2,40	1,60
16	2,25	1,50
17	2,12	1,41
18	2,00	1,33
19	1,89	1,26
20	1,80	1,20
21	1,71	1,14
22	1,64	1,09
23	1,57	1,04
24	1,50	1,00
25	1,44	0,96

Die aus den Tabellen ersichtlichen Einstellungen für Inspirations- und Expirationszeit stellen lediglich eine Orientierung dar. Bei der Verwendung sind alle Angaben entsprechend der Möglichkeiten des Respirators auf- oder abzurunden.

© zwai.media GbR 2006

Der Autor übernimmt trotz sorgfältiger Erstellung keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben.

Autor: Hanno H. Endres

<http://www.zwai.net>



<http://www.zwai.net>

Die aus den Tabellen ersichtlichen Einstellungen für Inspirations- und Expirationszeit stellen lediglich eine Orientierung dar. Bei der Verwendung sind alle Angaben entsprechend der Möglichkeiten des Respirators auf- oder abzurunden.

Der Autor übernimmt trotz sorgfältiger Erstellung keine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben.

Autor: Hanno H. Endres

<http://www.zwai.net>

Dräger Evita 1 ® BiPAP® - Einstellungen über das Menu

2:1		
Frequenz	Inspiration (sec.)	Expiration (sec.)
7	5,71	2,86
8	5,00	2,50
9	4,44	2,22
10	4,00	2,00
11	3,64	1,82
12	3,33	1,67
13	3,08	1,54
14	2,86	1,43
15	2,67	1,33
16	2,50	1,25
17	2,35	1,18
18	2,22	1,11
19	2,11	1,05
20	2,00	1,00
21	1,90	0,95
22	1,82	0,91
23	1,74	0,87
24	1,67	0,83
25	1,60	0,80